

FIRING PASTE

Material de suporte para queima

Materiais compatíveis:

Dissilicato de lítio, zircônia, resinas, metais, etc.

Vantagens:

Fácil de limpar, sem resíduos, excelente fixação

Composição :

Al_2O_3 (óxido de alumínio), SiO_2 (dióxido de silício), HEC, PEG, água destilada

Utilização :


A. Dissilicato de lítio




Aplicação da pasta



Fixação no pino de suporte

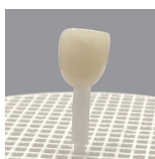

Colocação no tabuleiro

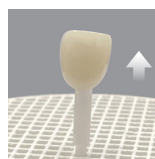


Início do ciclo de queima




Eliminação de resíduos


B. Zircônia

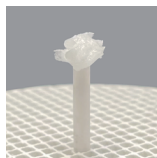

Aplicação da pasta

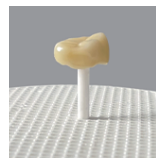

Colocação da coroa

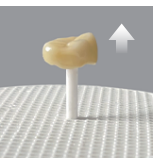

Início do ciclo de queima



Eliminação de resíduos

Utilizada para manter as restaurações durante o processo de queima.

Não altera a tonalidade dos elementos durante a queima.

Remove-se facilmente após a queima, sem necessidade de jato de areia e sem resíduos.

Não é necessário prolongar o tempo de pré-secagem no forno cerâmico.

Informação regulamentar :

Este produto é um material de suporte destinado exclusivamente a uma utilização técnica em laboratório dentário.

Não se destina a uso intraoral nem ao contacto com o paciente.