

FIRING PASTE

Material de suport per a la cocció

Materials compatibles :

Disilicat de liti, zircònia, resines, metalls, etc.

Avantatges :

Fàcil de netejar, sense residus, excel·lent fixació

Composició :

Al_2O_3 (òxid d'alumini), SiO_2 (diòxid de silici), HEC, PEG, aigua destil·lada

Ús :


A. Disilicat de liti




Aplicació de la pasta



Fixació al pin de suport

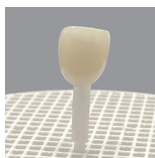

Col·locació al plat

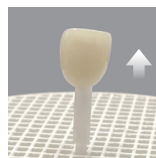


Inici del cicle de cocció




Eliminació dels residus


B. Zircònia

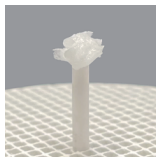

Aplicació de la pasta

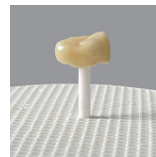

Col·locació de la corona

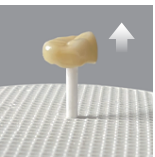

Inici del cicle de cocció



Eliminació dels residus

Utilitzada per mantenir les restauracions durant el procés de cocció.

No modifica la tonalitat dels elements durant la cocció.

S'elimina fàcilment després de la cocció, sense necessitat de sorrejat i sense residus.

No és necessari prolongar el temps de preassecat al forn ceràmic.

Informació reglamentària :

Aquest producte és un material de suport destinat exclusivament a un ús tècnic en laboratori dental.

No està destinat a un ús intraoral ni al contacte amb el pacient.