

FIRING PASTE

Materiale di supporto per la cottura

Materiali compatibili :

Disilicato di litio, zirconia, resine, metalli, ecc.

Vantaggi :

Facile da pulire, senza residui, eccellente tenuta

Composizione :

Al_2O_3 (ossido di alluminio), SiO_2 (biossido di silicio), HEC, PEG, acqua distillata

Utilizzo :


A. Disilicato di litio




Applicazione della pasta



Fissaggio sul perno di supporto

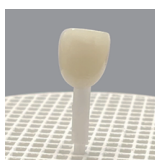

Posizionamento sul vassoio

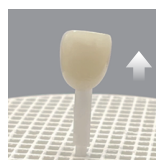


Avvio del ciclo di cottura




Rimozione dei residui


B. Zircone

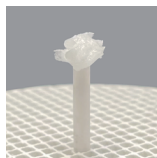

Applicazione della pasta

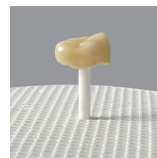

Posizionamento della corona

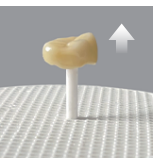

Avvio del ciclo di cottura



Rimozione dei residui

Utilizzata per mantenere le restaurazioni durante il processo di cottura.

Non altera la tonalità degli elementi durante la cottura.

Si rimuove facilmente dopo la cottura, senza necessità di sabbiatura e senza residui.

Non è necessario prolungare il tempo di pre-asciugatura nel forno ceramico.

Informazioni regolatorie :

Questo prodotto è un materiale di supporto destinato esclusivamente a un utilizzo tecnico in laboratorio odontotecnico.

Non è destinato all'uso intraorale né al contatto con il paziente.