

FIRING PASTE

Matériau de support de cuisson

Matériaux compatibles :

Disilicate de lithium, zircone, résines, métaux, etc.

Avantages :

Facile à nettoyer, sans résidus, excellent maintien

Composition :

Al_2O_3 (oxyde d'aluminium), SiO_2 (dioxyde de silicium), HEC, PEG, eau distillée

Utilisation :


A. Disilicate de lithium




Application de la pâte




Fixation sur le pin de support

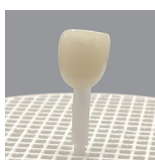

Mise en place sur le plateau

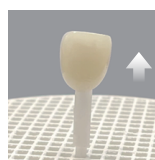


Lancement du cycle de cuisson

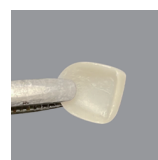


Élimination des résidus


B. Zircone

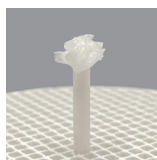

Application de la pâte sur le support

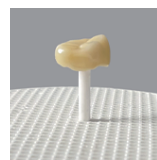

Mise en place de la couronne

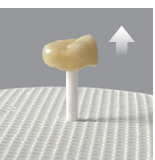

Lancement du cycle de cuisson



Élimination des résidus

Utilisée pour maintenir les restaurations pendant le processus de cuisson.

Ne modifie pas la teinte des éléments pendant la cuisson.

Se retire facilement après la cuisson, sans sablage et sans résidus.

Il n'est pas nécessaire de prolonger le temps de pré-séchage dans le four à céramique.

Information réglementaire :

Ce produit est un matériau de support destiné exclusivement à une utilisation technique en laboratoire dentaire.

Il n'est pas destiné à un usage intra-oral ni à un contact avec le patient.