

FIRING PASTE

Material de soporte para la cocción

Materiales compatibles :

Disilicato de litio, zirconio, resinas, metales, etc.

Ventajas :

Fácil de limpiar, sin residuos, excelente fijación

Composición :

Al_2O_3 (óxido de aluminio), SiO_2 (dióxido de silicio), HEC, PEG, agua destilada

Uso :


A. Disilicato de litio




Aplicación de la pasta




Fijación sobre el pin de soporte

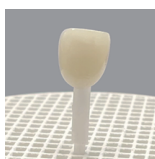

Colocación sobre la bandeja

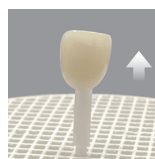


Inicio del ciclo de cocción

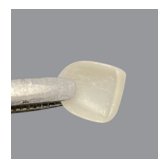


Eliminación de residuos


B. Zirconio

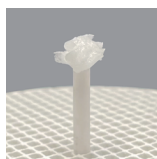

Aplicación de la pasta sobre el soporte

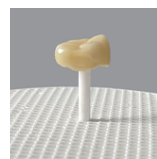

Colocación de la corona

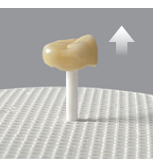

Inicio del ciclo de cocción



Eliminación de residuos

Se utiliza para mantener las restauraciones durante el proceso de cocción. No altera la tonalidad de los elementos durante la cocción.

Se retira fácilmente tras la cocción, sin necesidad de arenado y sin dejar residuos.

No es necesario prolongar el tiempo de presecado en el horno cerámico.

Información reglamentaria:

Este producto es un material de soporte destinado exclusivamente a uso técnico en laboratorio dental.

No está destinado a uso intraoral ni al contacto directo con el paciente.